



Противоожоговая противопрлежная реабилитационная кровать

## Medical Suspension Bed



**MEDICAL SUSPENSION BED**


NINGBO DENGHUANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD

**ROS/MEDIKA**


## Противоожоговая противопрлежневая реабилитационная кровать Medical Suspension Bed – YXFCH-xx

Кровать противоожоговая Medical Suspension Bed предназначена для ухода за пациентами с ожогами, ранениями (в особенности областей спины, ягодиц, ног), ICU, кожными заболеваниями, язвами, после операций (на сердце, на мозге, на костях и суставах), в реабилитационном центре и для лежачих пациентов (паралич, поражение мозговых центров).




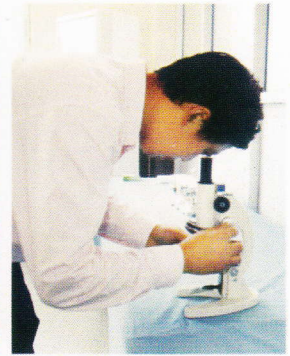


Производство расположено в Китае и соответствует стандартам ISO9001:2008 и ISO 13485:2003. Завод оснащён самым современным высокотехнологичным оборудованием.

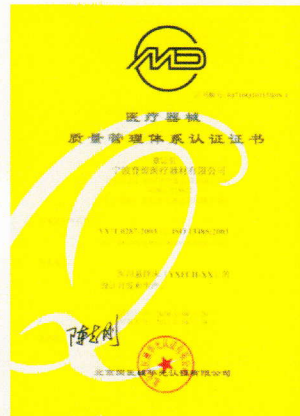

Основные комплектующие использованы импортного производства или от производителей с совместными китайско-зарубежными инвестициями, что гарантирует стабильность и надёжность использования противоожоговых кроватей Medical Suspension Bed.

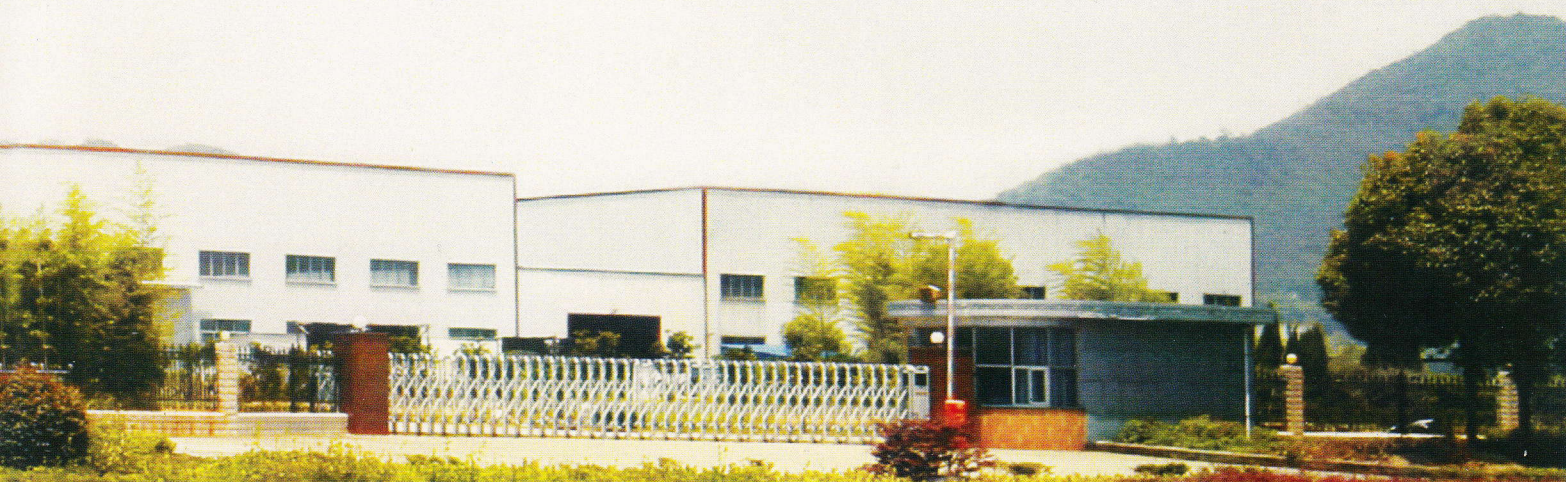

- База пациентов
- Полностью автоматический контроль за всем процессом работы кровати
- Кровать оснащена встроенным принтером
- Автоматическая система самодиагностики
- Встроенная система весов
- Импортная перфорированная воздухораспределительная панель (не содержит химических клеящих веществ)
- Гарантия на противоожоговую кровать Medical Suspension Bed составляет 2 года
- Пожизненное сервисное обслуживание

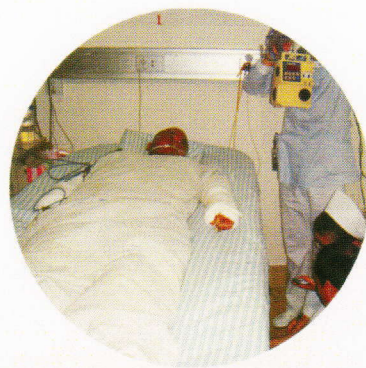


**В зависимости от состояния пациента можно использовать один из двух режимов: непрерывная или пульсирующая флюидизация.**

- Режим непрерывной флюидизации рассчитан на получение положительного терапевтического эффекта;
- Режим пульсирующей флюидизации более предпочтителен для профилактики.

**Регулирование температуры микрошариков даёт возможность пользователю установить оптимальную температуру.**

- Обдув пациента сухим воздухом позволяет предотвратить раздражение кожи, вызванное выделением организмом пациента потом.

Работа кровати Medical Suspension Bed основана на эффекте псевдожидкости: пациент «плавёт» в «сухой жидкости», которая образуется микрошарами (из керамики, органического кварца - безвредного, бесцветного, без запаха), парящими в воздушном потоке.

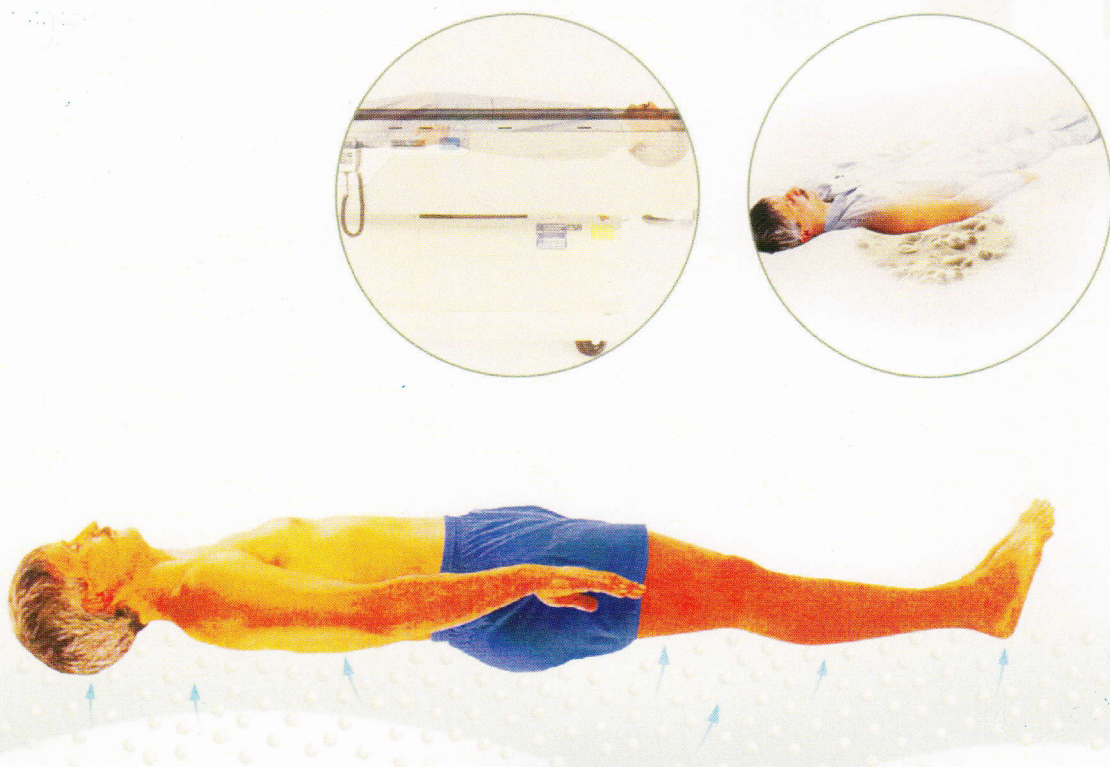

Кровать Medical Suspension Bed используется для ухода и лечения ожоговых пациентов в лечебных учреждениях. Данная кровать увеличивает площадь соприкосновения тела пациента с поверхностью кровати, уменьшает давление на поверхность тела, эффективно снижает боли пациента, гарантирует нормальную микроциркуляцию в сосудах пациента.



Максимальный вес пациента	>135 kg.	Точность контроля температуры наполнителя	±1 °C
Уровень шума	<50 dB	Диаметр микросфер	50 μm – 154 μm
Мощность вентилятора	0.75 kw	Вес кровати с наполнителем (вес микросфер)	830 kg. (560 kg.)
Размер ячейки фильтрующей простыни	<37 μm	Мощность нагревателя	1.0kw
pHнаполнителя	7.2	Рабочая температура окружающей среды	18 °C -26 °C
Диапазон контроля температуры	28°C – 41.5 °C	Габаритные размеры кровати (мм.)	2250 x 935 x 920
Напряжение сети	220 VAC ± 15 %	Точность измерения веса пациента	0.1 kg.
Снижение давления тела и поверхности более чем на	71.4 %	Контроль влажности поверхности кровати	<47 % RH

- Модуль дегидратации/осушения воздуха
- Защита от перегрузок воздушного компрессора, блока дегидратации и блока нагрева
- Система прерывистой флюидизации
- Ручной и ножной выключатели
- Водяная и воздушная системы охлаждения
- Тракционная рама с 4-мя точками опоры
- Держатель для интравенозных ёмкостей
- Автоматическое отключение при достижении температуры наполнителя 40 °С
- Таймер
- Сигнал тревоги





## NINGBO DENGHUANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ и стран СНГ компания РосМедика (ООО «РосМедика»)

Тел./факс (г. Москва): +7 (495) 640-61-28

Тел./факс (г. Санкт-Петербург): +7 (812) 363-23-95, +7 (812) 363-23-96

Website: <http://www.rosmedika.ru>

E-mail: [info@rosmedika.ru](mailto:info@rosmedika.ru)